

居家验血使用说明



为了能够顺利取血，建议您在开始取血之前补充足够的水分。



开始检测之前请通过扫描说明书上的二维码或登录tests.mojoon.com/register来完成注册

在您完成注册检测盒和观看过指导视频之后就可以按照以下步骤完成血液样本收集。

收集血样

1. 准备工作

在血液收集卡上填写您的姓名、取样的日期和您的出生日期。温馨提示：为了能够顺利取血，可以用热水洗手以促进手指血液循环。您也可以尝试转圈运动方式摆动手臂以提高心率。（增加血液循环和热身是为了确保尽可能的用一只手指完成采血）

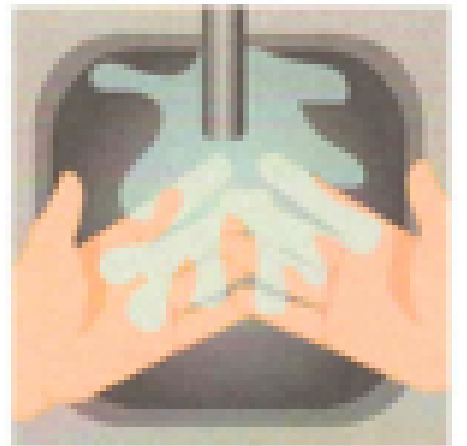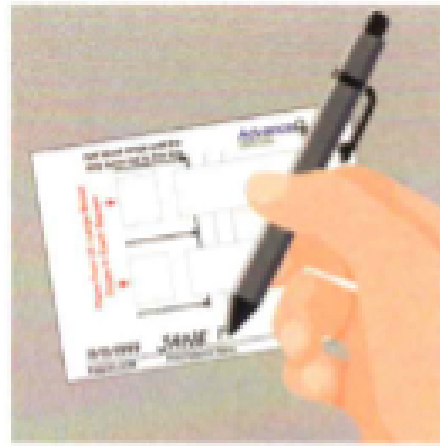

2. 使用采血针

请使用检测盒内附的酒精棉片清洁中指或无名指。

旋转拧开采血针的盖子，将采血针压在指尖侧面，采血针将自动释放，刺破皮肤，您可能感到微微的刺痛。

如果需要，测试盒内提供了额外的采血针。



3. 取血

血液收集卡共有上下2个收集槽，请完成一个以后再继续下一个。请将4-6滴血滴到左侧正方形收集区内，血量需要至少到达右侧长方形内的第一个线，但不要超过第三根线。注意：请不要将血液直接滴到长方形区域内。



回邮样本

请将收集的样本在24小时内邮寄回实验室

将血液收集卡静置风干至少45分钟

将干燥后的血液收集卡放入血样储存袋内

将血样储存袋放入预付信封内密封投递

