

# 居家尿样收集教程



请在收集尿样之前补充足够的水分，并且尽量在收集尿样前1-2个小时不要排尿。

开始检测之前请通过扫描说明书上的二维码或登录[tests.mojoon.com/register](https://tests.mojoon.com/register)来完成注册


在您完成注册检测盒和观看过指导视频之后就可以按照以下步骤

## 收集尿样

### 1. 准备工作

请在尿样收集管的标签上填写您的姓名、取样日期以及生日。

请使用提供的一次性硅胶杯收集最开始排出的尿液，

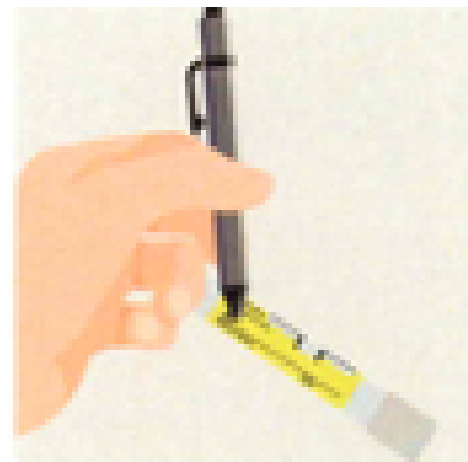

### 2. 转移尿样


拧开尿样收集管的盖子，准备将尿样从硅胶收集杯内转移至收集管内。尿样收集管内存有试剂，请勿撒漏试剂。

使用内附吸管将尿样从硅胶收集杯转移至收集管内。



### 3. 检查尿量并密封

持续添加尿样至其水平达到最低尿样要求线，但不要超过指定的最高水平，在收集到足够的尿样后请拧紧收集管的盖子。

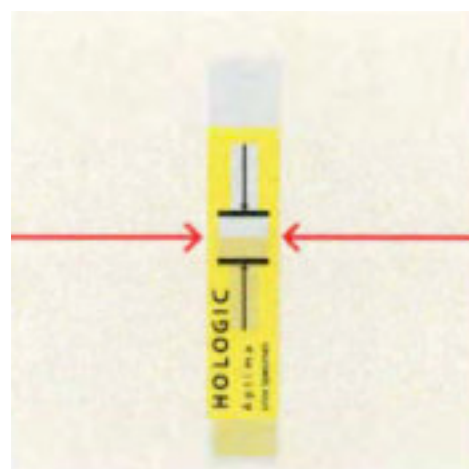

## 回邮样本

请将收集的样本在24小时内邮寄回实验室

请将拧紧的尿样收集管放入内附的生物危险袋中。再将生物危险袋及血样储存袋（如有）放入预付信封内密封投递、

